



PRECONISATIONS DES TUBES POUR PRELEVEMENTS EXTERIEURS



TUBES A PRELEVEMENT

Nos tubes sont identifiés avec les codes couleur de la norme internationale ISO 6710.

Un trait de limite de remplissage existe sur chaque tube dont le niveau peut être différent. L'ordre des tubes de prélèvement ci-dessous doit être respecté pour garantir la qualité analytique de l'échantillon.



Tube citrate (coagulation) **ATTENTION : A remplir impérativement jusqu'au trait**



Tube sec



Tube hépariné (ionogramme)



Tube EDTA (hémogramme), un 2^{ème} tube doit être prélevé systématiquement en cas d'hémoglobine glyquée, de groupe sanguin ou de BNP.



Tube monoiodacétate ou fluorure (glycémie)

- En cas de prélèvement avec ailettes (épicrâniennes) et de tube bleu à prélever, utiliser un premier tube citrate (bouchon bleu) comme tube de purge avant de prélever le second tube citrate nécessaire à l'analyse. L'étiquetage se fera sur le second tube.
- Veiller à utiliser le tube correspondant à l'analyse (cf. la table de préconisation des tubes pour les examens les plus courants). En cas de doute ou d'examen particulier, ne pas hésiter à contacter le laboratoire pour tout renseignement au 03.27.81.68.55, de 7h à 19h.
- Attention de ne pas utiliser de tubes dont la date de péremption est dépassée !



PRECAUTIONS A PRENDRE CONCERNANT LE PRELEVEMENT

- Se référer au catalogue d'analyse **ILab** disponible sur le site www.oxabio.fr (rubrique Préleveurs/Prélever) ou sur l'application **ILab-pro**, application gratuite et disponible en demandant l'ouverture d'un compte à votre **Responsable Biomédicale de Secteur**. **D'une façon générale, patient à jeun de préférence.**
- En cas d'utilisation conjointe de différents tubes, éviter les contaminations en respectant l'ordre des tubes ci-dessus pendant le prélèvement et ne pas transvaser.
- Mélanger le tube par retournements 5 à 10 fois.



IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

- Attention d'identifier correctement le tube, avec le nom, le nom de naissance, le prénom et la date de naissance du patient au moment du prélèvement.



TRANSMISSION DU PRELEVEMENT AU LABORATOIRE

- Paramètres classiques devant parvenir rapidement au laboratoire : potassium, TCA, VS,
- Pour les paramètres particuliers, se référer à la flèche des délais, consulter ILAB ou contacter le laboratoire)
- Températures de transport : 15-25 °C. **ATTENTION : le potassium augmente sensiblement dans le temps dès que les températures sont inférieures à 15 °C.**
- Pour les dosages de médicaments : prélever avant la prise du médicament, noter le médicament, les heures de dernière prise et la posologie.

**NON EXHAUSTIF SE REFERER A ILAB POUR ACTUALISATION****TABLE DE PRECONISATION DES TUBES**

	ACC ou anticoagulant circulant : 2 tb Antithrombine III D-dimères Dosage de facteurs (VIII, IX, ..., V, ...) : prélever un deuxième tube (délai 4h)	Fibrinogène Héparinémie (activité anti Xa) * INR (surveillance AVK) Plaquettes sur citrate (en cas de contrôle, avec systématiquement un tube EDTA)	Protéine C Protéine S Résistance à la protéine C activée TP (Taux de Prothrombine) TCA (Temps Céphaline Activé)
	Acide Valproïque (DEPAKINE) Alpha 1 antitrypsine AMH Anticorps anti-Cardiolipines Anticorps anti-CCP Anticorps anti-DNA Anticorps anti-nucléaires Anticorps anti récepteur TSH Anticorps anti-thyroïdiens (ATG/ATPO) Anticorps anti-transglutaminase Antistreptodornase (ASD) Antisteptolysine (ASLO) Carbamazépine (Tegréto)l CDT HN Cortisol sérique, à 8h	Digoxine (plvt avant prise tt) EBV (sérodiagnostic) Electrophorèse des protéines et immunoélectrophorèse Folate sérique AJ FSH FT3 FT4, avant la prise du Lévothyrox IgE spécifiques (RAST) IgE totales LH Lithium sérique Magnésium sérique Œstradiol sensitive Orosomucoïde PCT	Ostéocalcine Phadiatop (allergie respiratoire) Préalbumine Progesterone Prolactine* PTH SDHEA Testostérone Thyroglobuline Trophatop (allergie alimentaire) TSH Vitamine B12 AJ , B6 Vitamine D AJ Vitamines à l'abri de la lumière: A1 AJ , E AJ
2 ^{ème} tube à préle ver 	Aldosterone * Anticorps anti-EBV (VCA-EBNA) Auto-immunité : Ac anti-DNA – Ac anti- nucléaire soluble (AAN) - ... Marqueurs tumoraux : ACE – AFP (Alpha 1-foetoprotéine) - CA125 - CA 15.3 - CA 19.9 – PSA (Totale et Libre, attention délai 5h pour PSAL) NSE Peptide C	HT21** Insuline Sérologie virale : CMV - Hépatite A / B (Ac totaux anti-HBc, IgM anti HBc, Ac anti- HBs, Ag HBs) / C / E – HIV — HSV HN – HTLV – Oreillons - Parvovirus – Rubéole – VZV HN (varicelle-zona) Delta 4 Androstenedione SHBG 1.25 Vitamine D Calcitonine	Sérologie bactérienne : Lyme (ou Borréliose) – Chlamydiae – Mycoplasme pneumoniae – Syphilis (= BW) Test de grossesse (HCG) Toxoplasmose (sérologie) Gastrine AJ Helicobacter pylori Phosphatases alcalines osseuse
	Acide urique Albumine sérique Beta 2 microglobuline Bicarbonates Bilirubine Calcium Cholestérol AJ CPK Créatinine CRP	Examen Anomalie Lipidique (EAL) AJ Apolipoprotéine A1 Facteurs rhumatoïdes Fer et coefficient de saturation Ferritine Folates érythrocytaires (sans gel) GGT Haptoglobine Immunoglobulines (Ig) A, G, M Ionogramme (Chlore, Potassium délai 6h, Sodium) LDH Lipase Magnésium globulaire	Phosphatases alcalines Phosphore Protides totaux Transaminases Transferrine Triglycérides AJ Troponine Haute Sensibilité (urgence à signaler) Urée Vitamines à l'abri de la lumière AJ : C HN , K HN , PP HN
	Coombs direct Fructosamine HLA B27*** HN Mutation C282Y*** Hémochromatose Mutation H63D*** Hémochromatose HN	Mutation Facteur V Leiden*** Mutation Facteur II*** NFS (numération Formule Sanguine) Plaquettes	Protoporphyrine-zinc Réticulocytes Test de Kleihauer Vitesse de sédimentation Vitamine à l'abri de la lumière AJ : B1
2 ^{ème} tube 	ACTH prélever à 8h (dans la glace) Aldostérone (à préciser : debout ou couché) Ammoniémie (dans la glace)	BNP Charge virale : hépatite B, C et HIV Hémoglobine glyquée (HbA1c) Cyclosporine-Tacrolimus (posé et heure de dernière prise)	Groupe rhésus, phénotype + CNI RAI (Agglutinines Irrégulières) + CNI Rénine (à préciser : debout ou couché)
	Alcoolémie Glycémie AJ	Lactate*	

* Protocole particulier

AJ = à jeun**HN** : Hors Nomenclature

** Consentement+ attestation médicale de consultation + renseignement clinique de l'échographie + poids

*** : Consentement + attestation médicale de consultation