



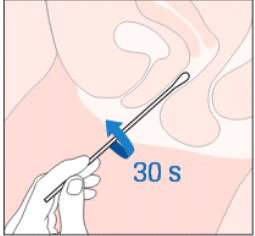
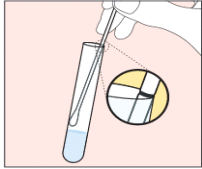
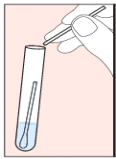
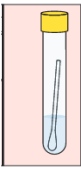
PROTOCOLE DE PRELEVEMENT DE CHLAMYDIA ET GONORRHOEAE

Collecte d'échantillons urinaires avec le kit PCR Cobas®

	<p>1/ PIPETER : Transférer immédiatement l'urine dans le tube de milieu pour PCR Cobas® en utilisant la pipette jetable.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ne pas avoir uriné depuis au moins 1 heure ✓ Pas de toilette locale ou vaginale ✓ Fournir le premier jet d'urine (10 à 15 ml) dans un flacon de collecte 	<p>Stockage et transport :</p> <p>Hors milieu de transport :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 h ✓ Entre +2 et +30 °C <p>Dans milieu de transport</p>
	<p>2/ TRANSFERER : Le volume correct d'urine a été ajouté lorsque le niveau de liquide se situe entre les deux lignes noires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 12 mois ✓ Entre +2 et +30 °C <p>Refus de l'échantillon :</p>
	<p>3/ FERMER : Refermer le tube du milieu PCR Cobas® en serrant bien le bouchon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Volume de remplissage inadéquat (entre les deux lignes noires) ➤ Présence de sang
	<p>4/ MELANGER : Retourner le tube 5 fois pour mélanger.</p> <p>5/ IDENTIFIER et DATER: Indiquer le nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement.</p>	



Prélèvement VAGINAL sur écouvillon Cobas® PCR

	<p>1/ PRELEVEZ :</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisez un seul écouvillon et jeter le second ; Insérez l'écouvillon à une profondeur de 5 cm dans l'ouverture vaginale ; Faites tourner doucement l'écouvillon pendant environ 30 sec tout en le frottant contre les parois vaginales ; Retirez soigneusement l'écouvillon ; Veillez à ce que l'écouvillon n'entre en contact avec aucune surface. 	<p><u>Stockage et transport :</u></p> <p><u>Hors</u> milieu de transport :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 24 h ➤ Entre +2 et +30 °C <p><u>Dans</u> milieu de transport</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 mois ➤ Entre +2 et +30 °C <p><u>Refus de l'échantillon :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Présence de sang ➤ Présence de 2 écouvillons dans le tube
	<p>2/ POSITIONNEZ :</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirez le bouchon du tube de milieu PCR Cobas® ; Placez l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige de l'écouvillon soit alignée avec le bord du tube. 	
	<p>3/ BRISEZ :</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclinez avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne noire ; Jetez la partie supérieure de l'écouvillon. 	
	<p>4/ FERMEZ :</p> <ul style="list-style-type: none"> Refermez le tube de milieu PCR Cobas® en serrant bien le bouchon. <p>5/ IDENTIFIER et DATER :</p> <ul style="list-style-type: none"> Indiquer le nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement. 	



Ecouvillonnage ENDOCERVICAL avec le kit PCR Cobas®

	<p>1/ NETTOYER :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlever tout excès de mucus de l'orifice cervical et de la muqueuse avoisinante ; • Utiliser plus d'un écouvillon si besoin puis jetez les. 	Stockage et transport :
	<p>2/ COLLECTER :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insérez un nouvel écouvillon propre dans le canal endocervical ; • Faites tourner 5 fois l'écouvillon dans un sens ; • Retirez soigneusement l'écouvillon sans toucher la muqueuse vaginale. 	<p>Hors milieu de transport :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 24 h ➤ Entre +2 et +30 °C <p>Dans milieu de transport</p>
	<p>3/ POSITIONNEZ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirez le bouchon du tube de milieu PCR Cobas® ; • Placez l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige de l'écouvillon soit alignée avec le bord du tube. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 mois ➤ Entre +2 et +30 °C
	<p>4/ BRISEZ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclinez avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne noire ; • Jetez la partie supérieure de l'écouvillon. 	Refus de l'échantillon :
	<p>5/ FERMEZ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refermez le tube de milieu PCR Cobas® en serrant bien le bouchon. <p>6/ IDENTIFIER et DATER :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indiquer le nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Présence de sang ➤ Présence de 2 écouvillons dans le tube